

睛靈 UV 濾藍光彩色隱形眼鏡-月拋型

SMART VISION UV&BLUE CUT Color Contact Lens -Monthly

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

本器材須經眼科醫師處方使用

衛部醫器製字第_005155_號

鏡片規格

材質	效能/特性	矯正近視	光學特性 / 規格	球面光度	0.00 to - 6.00D (0.25D steps)	
	抗紫外線	在波長 316~380nm, UVA 光穿透率<30%			-6.50 to - 12.00D (0.50D steps)	
		在波長 280~315nm, UVB 光穿透率<5%				
	濾藍光	在波長 410 ~ 460nm, 藍光穿透率<90%		直徑	13.8 ~ 15.2 mm	
	材質	Hema-copolymer 62%			中心厚度	0.060 ~ 0.180 mm
	含水量	38%		外觀規格	顏色	淡黃透明 + 1Tone-藍、棕、綠、紫、灰、黑、粉紅 2Tone-藍、棕、綠、紫、灰、黑、粉紅 3Tone-藍、棕、綠、紫、灰、黑、粉紅
	材質特性	親水性				包裝方式
配戴方式	日戴型、月拋式					

用途：本產品適用於無眼疾之近視患者，為矯正視力用之日戴型軟性隱形眼鏡。可阻斷部分 UVA、UVB、藍色可見光(波長 410~460nm)。

禁忌症：眼角膜、結膜疾患者及乾眼症、水晶體或視網膜疾患者應在眼科醫師指示下配戴。

配戴說明：

1. 本產品作為月拋式軟性隱形眼鏡使用，每日配戴時間不得超過 12 小時，每日就寢前須取下鏡片作清潔保養，配戴不得超過 1 個月。
2. 初次配戴者，開始配戴時間 4 小時，隨後每日增加 2 小時。

鏡片保養須知：每日清潔保養方法：

洗淨 → 保存

1. 將鏡片凹面向上放置於手心後，將適量隱形眼鏡專用洗淨液滴入手心中。
2. 用食指指腹輕揉鏡片正反面各 15-30 秒。
3. 洗淨後使用隱形眼鏡專用保存液或生理食鹽水將鏡片沖洗乾淨。
4. 用自來水清洗隱形眼鏡保存盒後，注入新鮮之隱形眼鏡專用保存液；再將鏡片正確的放入保存盒中，並將保存盒之蓋子確實旋緊並確認。
 - 注意：清洗鏡片時，勿以畫圓圈似之方式清洗鏡片，應朝手掌內側以單一方向輕揉（正反面皆同）。
 - 注意：請勿用力按壓鏡片或拉扯鏡片。
 - 注意：隱形眼鏡需在完全去除鏡片髒污狀態下以新的保存液保存鏡片；且時常以新的保存液保持鏡片的柔軟性及光學性。
 - 注意：保存盒的保存蓋上印有 R 及 L 的英文字母，請將左右鏡片正確放入保存盒中。
 - 注意：蓋子在旋緊時，要確認鏡片是否置妥於容器中。
 - 注意：鏡片保存盒蓋須常保持清潔及更換新保存液。

→ 請使用經由衛生福利部核准之隱形眼鏡清潔、保養用品；且確實遵照其指示，做好鏡片之清潔工作，確保眼睛健康。

使用注意事項：

- 在陽光環境下需要強調著重紫外線之防護時，必須搭配配戴可全方位覆蓋眼球的太陽眼鏡或全蓋式護具或紫外線眼罩，以達全面有效的防護效果。
- 配戴程序及時間請確實遵守，請使用正確的洗淨及保養方法。
- 保持手部及指甲之清潔，清潔時避免指甲刮傷鏡片。
- 就寢、洗澡及游泳前，請將隱形眼鏡取出。
- 配戴時勿造成隱形眼鏡的刮傷磨痕或破損，並應避免化粧品及噴霧狀之藥物等污染隱形眼鏡。
- 當鏡片乾澀或損壞時，須更換戴用新的隱形眼鏡。
- 如有使用抗生素、利尿劑、肌肉鬆弛劑、鎮定劑、抗暈劑或其它會引起眼睛乾澀、異物感、視力模糊等情況的藥物時，可使用軟性隱形眼鏡專用眼睛滋潤劑改善情況或停止配戴隱形眼鏡，但使用任何藥物前，均應先詢問眼科醫師。
- 注意眼部出現不適感或症狀應立即至眼科醫師處就診，也應定期接受眼科醫師檢查。

藥商/製造廠名稱：視茂股份有限公司

藥商地址：新北市新莊區五權一路 13 號之 1

製造廠地址：新北市新莊區五權一路 13 號之 1(1 樓及 2 樓)、13 號 5 樓之 3、13 號 7 樓之 2、13 號 8 樓之 3

配戴隱形眼鏡操作方式暨注意事項

【警告】

隱形眼鏡為直接配戴於眼角膜上之醫療器材，若不遵照鏡片使用方法或不遵守使用上的注意事項，會造成角膜潰瘍、角膜炎(含感染性角膜炎)、角膜浸潤、角膜糜爛、角膜水腫、結膜炎(含巨大乳突性結膜炎)、虹彩炎等傷害。這些傷害中，如果不盡快治療而置之不理，有可能致使眼睛失明。為了安全又正確地使用隱形眼鏡，務必詳閱原製造廠所提供之使用說明書，文字或內容文章有不清楚的地方，務必向眼科醫師詢問，並請妥善保留原製造廠所提供之使用說明書。

壹、軟式隱形眼鏡的處理方式

一、注意事項：

1. 初戴者，可從每天戴4至6小時開始，每日增加2小時。
2. 若有明顯不適之情形應儘早回診檢查，一切正常則應於一星期後回診。
3. 戴上鏡片後再化妝，摘下鏡片後再卸妝。
4. 必須知道清潔液、生理食鹽水、保存液、酵素液或酵素片的功用，開瓶後保存期限以仿單內之規定為準。

清潔液-清洗鏡片，生理食鹽水-沖洗鏡片，保存液-浸泡及消毒鏡片，酵素液-去蛋白。

5. 瓶蓋要朝上或側放，不得朝下擺放，以避免污染。
6. 固定先摘戴一眼，再摘戴另一眼(如先右後左)，以免鏡片左右顛倒。
7. 摘鏡片的食指、拇指指甲須剪短，以免摘鏡片時傷到眼球或隱形眼鏡。
8. 戴鏡片時要先分辨鏡片的正(如碗狀)反(如碟狀)面。
9. 所有與隱形眼鏡相關的物品，如鏡片、水盒或藥水等，不得擺放在潮濕處，如浴室。

二、鏡片配戴方法：

1. 用中性肥皂清洗雙手，再擦乾雙手。
2. 將鏡片置於右手食指指腹尖端，正面朝上。
3. 以右手中指拉開下眼皮，左手中指拉開上眼皮。
4. 兩眼直視前方，再將鏡片移至於黑眼珠上。
5. 確認鏡片已戴上，輕轉眼球，再慢慢鬆開雙手。
6. 若鏡片掉落地面或桌面，用姆指及食指抓取其邊緣即可取起。須重新洗乾淨、浸泡、消毒後再戴上(確定正反面)。

三、鏡片卸取方法：

1. 眼睛正視前方。
2. 以右手中指拉開下眼皮，左手中指拉開上眼皮。
3. 以右手拇指及食指指腹尖端，輕置於鏡片下緣。
4. 兩指合攏，輕輕取下鏡片。
5. 若鏡片掉落地面或桌面，用姆指及食指抓取其邊緣即可取起。

四、鏡片的清洗及保養方式：

1. 將鏡片放在左手掌心，清潔液搖勻後，倒一或二滴在鏡片上。
2. 以右手食指指腹，將鏡片呈放射狀向外搓揉20秒至30秒左右。
3. 以生理食鹽水將鏡片沖洗乾淨。
4. 將洗淨的鏡片分別置入水盒中(約七分滿的新鮮保存液)，浸泡6小時以上，才可取戴。

五、水盒的保養方式：

1. 每次使用後，以清水沖洗乾淨，再用力甩乾後放置陰乾。
2. 一星期消毒一次。用牙刷沾點"洗碗精"刷洗水盒凹槽處，再用熱水沖淋乾淨、放置陰乾即可。建議每三個月換新水盒。

六、酵素片的使用方法：

1. 水盒中注入生理食鹽水，左右各投入一片酵素片，待其完全溶解。
2. 事先以清潔液清洗鏡片，再用生理食鹽水沖淨。
3. 浸泡在酵素溶液中約30分鐘(不可超過2小時)。
4. 取出鏡片，用清潔液清洗，再用生理食鹽水沖淨。
5. 浸泡在新鮮的保存液中6小時以上，才可取戴。

貳、透氣硬式隱形眼鏡的處理方式

一、注意事項：

1. 請依照醫師指示定期回診。
2. 瞭解清潔液、生理食鹽水、保存液及酵素液的功用，並依照仿單內之方法進行清洗及消毒。
3. 瓶蓋要朝上或側放，不得朝下擺放或觸摸瓶口，用完立即蓋妥，以避免細菌污染。(藥水開封後限使用一個月，過期請換新)
4. 所有與隱形眼鏡相關的物品，如鏡片、水盒或藥水，不得擺放在潮濕處，如浴室。
5. 食指、拇指指甲須剪短，以免摘鏡片時傷到眼球或隱形眼鏡。

二、鏡片配戴方法：

1. 用中性肥皂清洗雙手，再用擦手紙將手擦乾。

2. 將鏡片置於右手食指尖端指腹，正面朝上。
3. 以右手中指拉開下眼皮，左手中指拉開上眼皮，將鏡片輕輕放角膜中央。
4. 確認鏡片已戴上，再慢慢鬆開雙手。

三、鏡片卸取方法：

<雙手摘法>

1. 眼睛直視鏡中。
2. 右手中指平按著下眼皮，固定鏡片下緣(勿太用力，以避免眼皮外翻)；左手中指平按著上眼皮，固定鏡片上緣。
3. 眼皮輕眨，鏡片會向下翻落。(注意以手接住)
4. 鏡片掉落地面或桌面上，切勿直接抓取，以免磨損鏡片表面。應該以紙片插入鏡片下面，或加水使鏡片浮起，再行撈起。

<單手摘法>

1. 將下巴稍為縮緊，眼睛張大，正視鏡中。
2. 以食指固定上眼皮，同一手中指固定下眼皮。(若眼睛無法張大，可用食指及中指將上、下眼皮稍微撐開)
3. 兩隻手指往外眼角斜上方拉(要有"緊"的感覺)，此時眼睛持續張大，再往鼻樑的方向看，鏡片會自然的被"推擠"出來。(注意以另一手接住)

<吸棒摘法>

1. 眼睛正視前方。
2. 以左手食指將上眼皮撐開，右手中指將下眼皮拉下。
3. 擠壓吸棒尾端，將吸盤覆上鏡片表面，放鬆擠壓以形成負壓將鏡片吸住。摘出鏡片後，再擠壓吸棒尾端，可除去負壓，取下鏡片。
4. 請務必確定鏡片位置，才可將吸棒吸附上去，以避免吸到眼球。
5. 吸棒摘取鏡片的方式很簡單，但請不要過度依賴它，最好學會徒手摘。

四、鏡片移位的處理方法：

1. 正視前方，眼球不要亂轉。
2. 用手摸眼皮或將眼皮撥開，確定鏡片的位置。(例：右下角)
3. 眼睛先往鏡片相反的方向看。(例：左上角)
4. 手指抵著鏡片外緣(右下角外)，眼睛看回鏡片原先的方向(右下方)。
5. 鏡片回到黑眼球中間，才可摘下鏡片。
6. 若鏡片無法以上述方式移回黑眼球，待確定位置後可用吸棒吸取。

五、隱形眼鏡水盒的保養方式：

1. 每次使用後，用自來水沖洗，再用力甩乾後放置陰乾。
2. 一星期消毒一次。用牙刷沾點"洗碗精"刷洗水盒凹槽處，再用熱水沖淋乾淨再放置陰乾。建議每三個月換新水盒。

* 另有高溫消毒及雙氧水消毒法，以遵照仿單之規定為準。

【禁忌及禁止】

配戴隱形眼鏡者，需依照當下的眼睛或身體的疾病、生活習慣或生活環境的情況，有可能需暫時停止使用隱形眼鏡。請務必經過眼科醫師的診察，確認無礙於疾病及環境後，再使用隱形眼鏡。

禁忌：●前眼部急性或亞急性發炎●眼睛感染●葡萄膜炎●眼瞼異常●角膜知覺低下●角膜上皮缺陷●乾眼及淚管缺陷●過敏●長時間生活在乾燥環境●長時間生活在粉塵、藥品等環境●其他不適合配戴隱形眼鏡者

【注意】

- 隱形眼鏡，請於醒著的時候使用，睡前請摘下。
- 屬每日拋棄式者，請每天更換新的鏡片(一旦摘下的鏡片，必須拋棄，不要重複配戴)。
- 其他型式者，請確實遵照原製造廠所提供之使用說明書進行清洗、清潔、保存、拋棄。
- 當配戴中鏡片破損時，請盡快找眼科醫師診治。
- 請不要使用有破損的鏡片。
- 請遵照鏡片更換頻率。
- 請遵照鏡片配戴時間，不要逾時配戴。
- 隱形眼鏡配戴時間因個人體質而不同，請務必遵照眼科醫師指示。
- 請定期做眼睛檢查。
- 當眼睛感到異常時，請盡快向眼科醫師診治。

【戴隱形眼鏡的危險】

在正確使用隱形眼鏡之下，仍然有可能使角膜內皮細胞減少等生理變化，或因戴隱形眼鏡的關係，鏡片使眼睛氧氣供應量降低，造成角膜上皮受傷或角膜新生血管等眼睛傷害的危險。為不致產生更嚴重的眼科疾病，有任何不適，請及早尋找眼科醫師診治，並定期檢查。